


# WINBACK®

INTIMITY

IT





Una soluzione efficace  
per **alleviare il dolore  
pelvico**

## Aiuta le tue pazienti a ritrovare il loro **comfort intimo**

### L'eccellenza al servizio del progresso tecnologico

WINBACK, è una corrente ad alta frequenza **non invasiva e indolore**, comunemente nota come tecarterapia, che allevia **il dolore, migliora la cicatrizzazione e accelera la guarigione**.

La filosofia WINBACK: **ascoltare, innovare, progettare** e andare oltre nello sviluppo della tecnologia e delle sue attrezzature. Mantenendo questo livello di eccellenza e innovazione, WINBACK offre alle ostetriche **le risposte che meglio soddisfano le loro esigenze e quelle delle loro pazienti**.

### Prendersi cura delle donne durante tutta la loro vita

Esistono numerosi cambiamenti che possono influire sulla qualità della vita delle donne e le ostetriche svolgono un ruolo fondamentale nell'accompagnarle nelle fasi principali della loro vita. Collaborando con specialisti di tutto il mondo, abbiamo sviluppato protocolli di trattamento adatti a tutti i disturbi che possono interessare le vostre pazienti: **alleviare il dolore, aiutare le donne a ritrovare il loro benessere intimo, accelerare la guarigione, migliorare la tonicità del perineo, ridurre i dolori pelvici, regolare i disturbi urinari, aiutare l'allattamento al seno...ecc.**

### Migliorare l'esperienza del parto

Tra le donne che hanno partorito in modo naturale e hanno avuto lesioni perineali (episiotomia, lacerazioni dal primo al quarto grado), oltre il 95% soffre di dolori perineali 24 ore dopo il parto e per oltre il 60% la durata può raggiungere i 7 giorni. È quindi importante prevenire questi rischi nelle madri giovani, poiché un dolore simile potrebbe impedirgli di apprezzare a pieno il loro nuovo ruolo. Winback è la risposta migliore per **un rapido supporto post-parto**.

## Una rete di specialisti

che riunisce 1.700 terapisti e professionisti della salute

### **WINBACK pone il professionista della salute al centro del suo sviluppo.**

Il suo fondatore, Christophe Buée, ha creato una soluzione per supportare l'esperienza manuale dei terapeuti: l'idea è offrire loro l'opportunità di trattare più patologie con più libertà.

Christophe si circonda di terapisti e professionisti della salute, con i quali lavora su casi clinici ispirandosi alle loro pratiche per innovare i suoi prodotti. Poi, insieme a scienziati e tecnici, migliora la tecnologia e le attrezzature esistenti.

Inoltre ha creato un'accademia che riunisce **oltre 1.700 esperti e utilizzatori di questa tecnologia**, il tutto guidato dalla stessa passione per l'eccellenza e dagli ambasciatori **della tecarterapia made in Winback**.

## WINBACK nel mondo

WINBACK è presente in **25 paesi** con oltre **3.200 apparecchiature di tecarterapia** utilizzate nell'ambito della riabilitazione, dello sport e della cura della persona. Un risultato raggiunto in meno di 4 anni e supportato dalla validità della terapia, riconosciuta e acclamata da migliaia di pazienti e atleti di alto livello.

**300**  
protocolli di trattamento  
in tutte le aree terapeutiche

**5000**  
professionisti della salute  
formati alla tecarterapia Winback

## L'accademia WINBACK INTIMITY

trovarsi per condividere le proprie esperienze

L'accademia WINBACK si occupa di **formazione teorica e pratica**, ma è anche una **rete di utilizzatori connessi** che si scambiano e condividono le **loro conoscenze**. Sin dall'origine della pagina Facebook della comunità dell'accademia Winback, la varietà di temi non smette di arricchire le possibilità di trattamento e utilizzo della tecnologia.

Entra nell'universo di Winback,  
insieme a migliaia di collaboratori coinvolti.



## Bio acceleratore Cellulare

L'energia WINBACK è una **corrente ad alta frequenza** che stimola l'attività cellulare.

Questa stimolazione porta a un aumento dell'attività metabolica. Ciò ha l'effetto di **accelerare la naturale rigenerazione dei tessuti** e il profondo coinvolgimento del sistema vascolare e linfatico.

La corrente oscilla tra 300 KHz e 1 MHz. Questo esclusivo intervallo di frequenze consente di **raggiungere con precisione i diversi strati di tessuto** (*epidermide, muscoli, articolazioni...*), trattando così le aree superficiali come quelle più profonde.

**100% energia naturale**  
**Non invasivo e indolore!**



RIEDUCAZIONE  
**2X**  
PIÙ RAPIDA<sup>(1)</sup>

### ① ELIMINA IL DOLORE

L'energia del ritorno agisce sui **nocicettori**, bloccando così l'impulso nervoso e causando la **secrezione di endorfine**. Ha un **effetto analgesico immediato** e per una **durata di oltre 48** ore dopo il trattamento.

### ② ALLEVIA LE TENSIONI

L'energia WINBACK scioglie le tensioni (contratture, edema, fibrosi) rivascolarizzandole localmente. **L'energia circola nuovamente nel tessuto danneggiato** e il muscolo riacquista flessibilità e libertà di movimento.

### ③ ACCELERARE LA RIGENERAZIONE CELLULARE

L'energia WINBACK accelera il naturale sistema di autoriparazione del corpo **promuovendo gli scambi intra ed extracellulari** in modo durabile. I benefici del trattamento si estendono oltre il tempo della sessione.

Contro-indicazioni: trapianti, pacemaker e organi artificiali, gravidanza, problemi di coagulazione, insensibilità alle variazioni di temperatura, ustioni, infezioni, cartilagine in crescita, ipotensione, flebiti, insensibilità al dolore, cancro solo previo consiglio medico.

Principio di precauzione: su materiale per osteosinte-si (non superare il 50% di potenza).

(1) Risultati due volte più rapidi sulla riabilitazione della cuffia dei rotatori. L'energia WINBACK deriva dalla tecnologia "TECAR", un termine usato da studi scientifici dal 1995. Terapia T.E.C.A.R. Nuova tendinopatia della cuffia dei rotatori: la nostra esperienza. G. Sanguedolce, C. Venza, P. Cataldo, G. Letizia Mauro - Presidente di Medicina Fisica e Riabilitazione - Università di Palermo, Settembre 2009. Frequenza utilizzata 500KHz


## CONFORTEVOLE

- Diverse misure di elettrodi che consentono un gesto preciso (2,5 cm - 3 cm - 4 cm - 6 cm)
- Impugnature ergonomiche adattate a tutte le morfologie (2 modelli diversi)
- Gestione rapida di diversi programmi per un comfort ottimale nel trattamento.
- Le mani restano libere durante i trattamenti grazie ai braccialetti Winback.

## INDICAZIONI

- Algie pelviche perineali
- Lacerazioni, episiotomie
- Edemi, ematomi
- Aderenze, fibrosi
- Vaginismo
- Vulvodinia
- Incontinenza
- Trigger points
- Gestione dello stress
- Dispareunie

## IGIENE RIGOROSAMENTE RISPETTATA

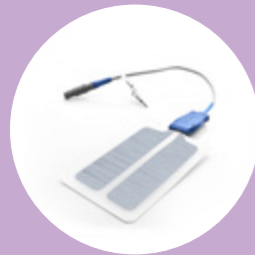

Piastre adesive monouso



Protezione per elettrodi monouso

## Il punto di forza di Winback: la tecnologia al servizio della tua esperienza

WINBACK ha sviluppato diverse **modalità di utilizzo** proponendo dei prodotti unici sul mercato che offrono manovrabilità, comfort e libertà di azione. WINBACK amplifica la potenza del tuo atto e **rende possibili una varietà di trattamenti unici per alleviare il dolore dei tuoi pazienti.**

### La differenza di WINBACK :

- ERGONOMIA
- COMFORT
- LIBERTÀ DI AZIONE
- RISULTATI



CERTIFICAZIONE ANSM  
E **CE** MEDICO

### APPROVATA DAI CENTRI OSPEDALIERI

Prima tecnologia di questo tipo a essere adottata nei centri ospedaliera

### STUDIO SCIENTIFICO

Studio randomizzato in doppio cieco in corso al Centro ospedaliero Nord di Marsiglia

### ULTRA LEGGERO

Solo 4 kg per un trasporto facile

## WINBACK 10 e la cicatrizzazione postpartum

Secondo le ultime statistiche, circa il 70% dei parti provoca traumi ai tessuti. In caso di taglio cesareo il tasso è stimato intorno al 19%. Qualunque sia il tipo di lesione, WINBACK è indicato nella gestione di questi traumi e accelera il recupero postnatale.

ELIMINA LE ADERENZE

ACCELERA LA GUARIGIONE

EFFETTO TENSORIALE SUI TESSUTI DEL PAVIMENTO PELVICO

ANTINFIAMMATORIO

ANTI-EDEMA



## WINBACK 20 e i dolori pelvici

*“Durante lo studio ho potuto notare, grazie al trattamento ad alta frequenza Winback, un reale beneficio nelle pazienti del gruppo trattato. Ho anche osservato un vero sollievo e un miglioramento incontestabile del comfort delle pazienti. Durante le prime sessioni, sono stata sorpresa dal grado della sua efficacia. In alcune pazienti c'è stata addirittura una diminuzione del volume dell'edema vulvare durante la sessione.*

Articolo pubblicato su Profession Sage-femme Ottobre 2017. Di **Marine Golka**, ostetrica

DOLORE PELVICO-PERINEALE

**98%**  
DI EFFICACIA<sup>(1)</sup>

(1)Pre-studio CHU Marseille Nord - L'energia Winback solleva le pressioni tissutali e aumenta la secrezione di endorfine per una durata superiore a 48 ore.





## WINBACK 5.0 : un'applicazione a mani libere

Scopri un'esperienza di trattamento\* unica che offre risultati eccezionali. **La mano attiva direttamente la risposta biologica trasmettendo l'energia Winback.** Potrai **muoverti liberamente**, eseguendo la tua azione terapeutica in modo naturale. Il calore generato dall'energia allevia i dolori e rilassa immediatamente la paziente. Questa modalità è particolarmente efficace sulle **cicatrici migliorando l'efficienza del massaggio manuale.**

Una rivoluzione nell'esperienza del trattamento terapeutico.



## WINBACK 4.0 il multipolare per azione concentrata e localizzata

WINBACK 4.0 offre energia **concentrica e superficiale con una reazione tissutale immediata.** Questa tecnologia è mutuata dal mondo della medicina estetica per una stimolazione veloce, efficace e locale dei tessuti cutanei. Gli studi hanno dimostrato che la tecnologia MIX stimola i tessuti in meno di 30 secondi fornendo gli stessi effetti vascolari, analgesici e cicatriziali di un trattamento WINBACK 1.0 standard di 3 minuti.


GUARIGIONE  
**97%**  
EFFICACIA <sup>(1)</sup>

L'energia WINBACK favorisce gli scambi intra ed extra-cellulari e, dunque, la più rapida cicatrizzazione dei tessuti.



(1) In 6 sessioni, il 97% di efficacia su disturbi muscolari e articolari. Valutazione degli effetti della multi frequenza in modalità di applicazione capacitiva per trattamenti di diatermia. S Piolani, A Soldadi, F Speciale, P Bonifacci, T Cuzzani, M Scacchetti, A Marsotti, S Alberti, M Cagnani, R Marzovillo, A Garvalli, G Poletti. Sport & Medicina Pulication. Gen / Feb 2009. Frequenze utilizzate 500 KHz, 750 KHz e 1 Mhz.



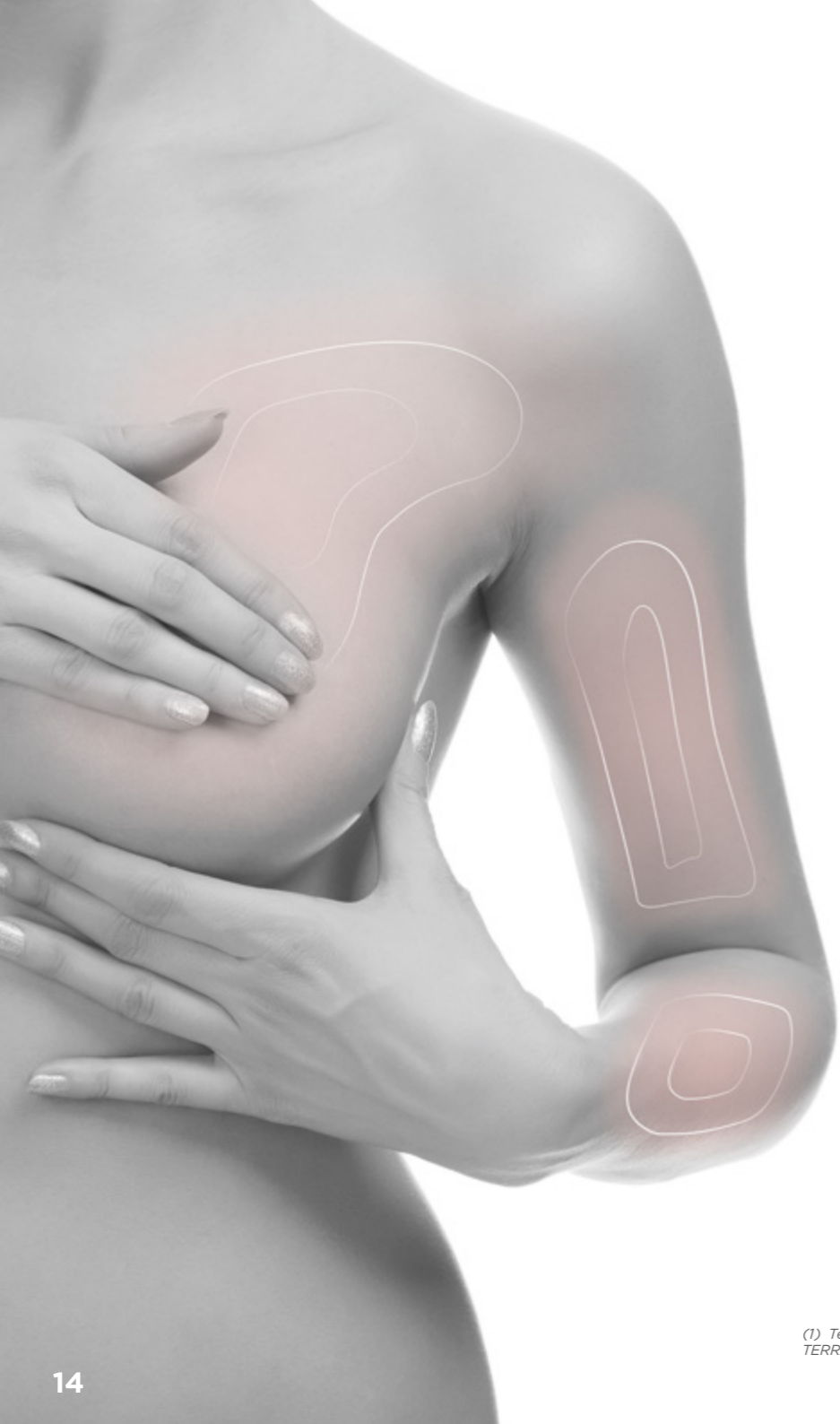

## Azione rapida e confortevole

DRENANTE

ANTINFIAMMATORIO

ANTI-EDEMA

ANTALGICO

VASCOLARIZZAZIONE

# 6X

PIÙ VELOCE <sup>(1)</sup>

La resistenza naturale dei tessuti trasforma l'energia WINBACK in calore (diatermia). Questo aumento di calore localizzato favorisce la vascolarizzazione delle zone poco irrorate dal sangue (fibrosi, contratture) e libera i movimenti.

(1) Terapia T.E.C.A.R. Trattamento di fratture femorali postoperatorie. A. TERRANOVA, G. VERMIGLIO, S. ARENA, A.Ciccio S. DI DIO I M. VERMIGLIO - Vol. 44

## Il trattamento dei dolori dell'allattamento al seno

---

La tecnologia Winback, in combinazione con la terapia manuale o le tecniche di drenaggio linfatico, è efficace nella **gestione del dolore causato dall'allattamento al seno**. Offre un comfort impareggiabile e provoca un sollievo immediato.

### Effetto drenante e decongestione mammaria

In caso di canali bloccati e ingorgo, Winback favorisce il drenaggio mediante stimolazione selettiva dei diversi gangli (vasodilatazione locale). L'uso della TECARTERAPIA Winback aiuta a prevenire l'edema del tessuto interstiziale o evitare che peggiori.

### Alleviare il dolore ai capezzoli

Esistono diversi metodi per aumentare la flessibilità del tessuto focalizzandosi su diversi strati del derma. Le modalità sviluppate da Winback facilitano il massaggio manuale per un comfort ineguagliabile.

L'energia Winback accelera la guarigione, blocca l'infiammazione e allevia il dolore in modo immediato e duraturo.



## Ritrovare il conforto intimo

ANTINFIAMMATORIO

IDRATAZIONE DEI TESSUTI

TONICITÀ MUSCOLARE

STIMOLAZIONE TISSUTALE

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI TROFICHE DEL DISTRETTO VAGINALE

AZIONE ANALGESICA

**+81%**  
IMMEDIATA <sup>(1)</sup>

Perturbazione del flusso nervoso e secrezione di endorfine: analgesia immediata e duratura. L'alleviamento del dolore al tatto favorisce un massaggio attivo profondo e supportato.

(1) È studio di trasferimenti elettrici ipertermici per il trattamento della lombalgia. Takahashi K., N. Tsuzuki, K. Zhong - SHI - Dipartimento di Chirurgia ortopedica - Centro medico - J Saitama. Fisico Sci 11: 45-51, 1999. Frequenza utilizzata 650 kHz.

## PROBLEMI URINARI E SESSUALI

La menopausa o altri eventi, come il parto, possono portare a una serie di cambiamenti fisiologici che alterano la qualità della vita delle pazienti. Incontinenza, secchezza vaginale, disuria, ecc...possono essere facilmente risolte con un trattamento Winback. WINBACK ha progettato delle manopole specifiche per effettuare trattamenti uro-ginecologici.

### INDICAZIONI :

dispareunia  
vaginismo  
vulvodinia  
emorroidi  
disuria  
incontinenza



MODALITÀ MANI LIBERE



MODALITÀ CON ELETTRODO

*Christina, 30 anni, ha partorito due mesi fa con un parto cesareo una bambina di 3050 grammi. Dopo il cesareo e la rimozione del catetere vescicale, non si sono verificate difficoltà o problemi di ritenzione. Christina però non provava alcuno stimolo di urinare. Su consiglio del medico, doveva andare sistematicamente in bagno ogni tre ore e "spingere bene per svuotare completamente" la sua vescica! L'assenza di stimoli la preoccupava molto e trascorreva le sue giornate a guardare l'ora per rispettare le indicazioni del medico. Poche ore dopo il trattamento con Winback, Christina ha iniziato a fare pipì senza problemi avendo trovato lo stimolo.*

*Ostetrica, Marsiglia*



## BACK 1S

Il **BACK 1S** offre tutti i vantaggi della tecnologia Winback con un peso minimo per la massima efficienza! Grazie ai suoi 4 chili potrà seguirti ovunque, senza essere ingombrante. La sua custodia è stata appositamente concepita per questo scopo.

### CARATTERISTICHE

**Potenza :** CET 400 VA - RET 100 Watts  
**Frequenza :** 500 KHz & 300 KHz  
**Funzione :** DINAMICA - IMPULSO BASSO  
SUPER PULSE - TIC SCAN

**Formazione :** Intimity (1 giorno per 2 persone)

**Peso :** 4 kg.

Custodia di trasporto opzionale

### WINBACK PACK 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 INCLUSO

#### WINBACK 1.0

- 8 elettrodi in modalità CET e RET di diverse dimensioni per l'azione mirata o radiale con estensioni delle impugnature CET e RET

- Piastra di ritorno standard

- Piastra di supporto adesivo e 20 piastre adesive

**WINBACK 2.0 :** 2 piastre adesive resistive (RET)

**WINBACK 3.0 :** 2 elettrodi mobili (1 in ciascuna mano)

**WINBACK 4.0 :** teste multipolari

**WINBACK 5.0 :** doppio cavo resistivo (RET), 2 braccialetti RET, 2 piastre adesive RET

*Prodotto nel rispetto delle norme ISO9001 - ISO13485 - KIWA 1984 Standard: CE MEDICO*

L'energia WINBACK,  
senza il peso.



## BACK 3SE

Il modello **BACK 3SE** è il massimo della Tecarterapia WINBACK. Può essere equipaggiato con 5 modalità di Tecarterapia Winback (da 1.0 a 5.0). È molto pratico con il supporto per gli accessori e il carrello mobile per facilitare lo spostamento. È anche scalabile per essere compatibile con le future innovazioni.

### CARATTERISTICHE

**Potenza :** CET 400 VA - RET 100 Watts  
**Frequenza :** **1 Mhz**, 500 KHz & 300 KHz  
**Funzione :** DYNAMIC - LOW PULSE  
SUPER PULSE - TIC SCAN - **MIX**

**Formazione :** Intimity (1 giorno per 2 persone)

**Carrello e porta accessori**

### WINBACK PACK 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 INCLUSO

#### WINBACK 1.0

- 8 elettrodi in modalità CET e RET di diverse dimensioni per l'azione mirata o radiale con estensioni delle impugnature CET e RET

- Piastra di ritorno standard + piastra di ritorno comfort

- Piastra di ritorno adesiva e 50 piastre adesive

**WINBACK 2.0 :** 2 piastre adesive resistive (RET)

**WINBACK 3.0 :** 2 elettrodi mobili (1 in ciascuna mano)

**WINBACK 4.0 :** teste multipolari

**WINBACK 5.0 :** doppio cavo resistivo (RET), 2 braccialetti RET, 2 piastre adesive RET

*Prodotto nel rispetto delle norme ISO9001 - ISO13485 - KIWA 1984 Standard: CE MEDICO*

Prestazioni e  
versatilità.



## **WINBACK EUROPE**

885 Av. du Docteur Lefebvre, Twins 2  
06270 Villeneuve-loubet - FRANCE  
T. +33 (0)4 83 66 16 66  
contact@winback.com  
[www.winback-intimty.com](http://www.winback-intimty.com)

## **WINBACK WORLDWIDE**

WINBACK FRANCE (FR) - [www.winback.com/fr](http://www.winback.com/fr)  
WINBACK ITALY (IT) - [www.winback.com/it](http://www.winback.com/it)  
WINBACK SPAIN (ES) - [www.winback.com/es](http://www.winback.com/es)  
WINBACK GO WEST (US) - [www.winback.com/en](http://www.winback.com/en)  
WINBACK GO EAST - [www.winback.asia](http://www.winback.asia)