
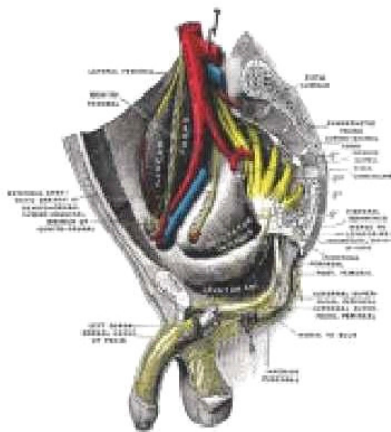


## CREDETE NEL POTENZIALE DEL VOSTRO CORPO!

**Vibratore terapeutico medicale portatile da utilizzare a supporto del trattamento delle disfunzioni erettile e per indurre l'eiaculazione in pazienti con lesioni spinali.**

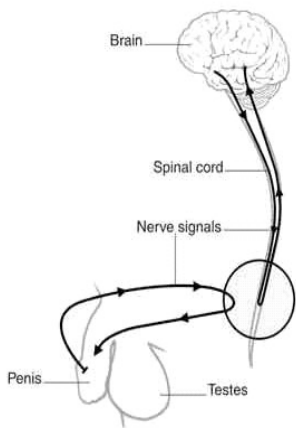

L'erezione è un riflesso nervoso. Milioni di recettori nervosi si trovano sulla superficie del pene. La loro stimolazione attiva i centri spinali e cerebrali che avviano il processo che porta all'erezione, al suo mantenimento e all'eiaculazione. Con specifiche frequenza e ampiezza di vibrazione, il Viberect stimola in modo sicuro questi sensori. Non servono farmaci, aghi, pompe. Tramite una delicata vibrazione indolore, il Viberect inizia il flusso ematico nel pene e stimola i muscoli che lo mantengono più a lungo e permettono una maggiore rigidità. Se la durata e la consistenza delle erezioni sono un problema, provate il Viberect.® .

1. Migliora la conduzione nervosa nel pene
2. Migliora il flusso ematico (Riflessi Pudendocavernoso e Bulbocavernoso)
3. Aiuta la forza muscolare attorno al pene che funziona da anello penieno







## ESERCIZI DI STRETCHING PRE-VIBERECT E APPLICAZIONE CORRETTA DEL VIBERECT PER UNA RISPOSTA OTTIMALE

**Sdraiatevi o sedetevi comodamente.**  
Stringete il glande come mostrato.



**Premete il glande e tirate il pene verso l'alto fino al suo limite naturale.**

Dovreste percepire un leggero riflesso passare attraverso il pene e la pelvi.



**Rilasciate fino alla normale lunghezza.**

Non rilasciate la stretta. Ripetere i passi 2 e 3 ogni 2-3 secondi per 2-3 minuti. Il pene gradualmente si riempirà di sangue e inizierà via via a irrigidirsi, predisponendo le vie nervose alla stimolazione col Viberecct.



**Impugnate il Viberecct® vicino all'estremità vibrante e orientate i Softpads verso il glande.**

Provate diverse posizioni. In piedi è una posizione efficace, col pene più in basso del cuore.



**Chiudendo la presa, il Viberecct® si attiva automaticamente. Applicate pressione.**

Potete muovere il Viberecct® per trovare la zona più sensibile.



**Ora stringete il pene**


Mentre stimolate col Viberecct®, mantenendolo per alcuni minuti (5-10 minuti).



# V VIBERECT®

CE

**SICURO  
FISIOLOGICO  
EFFICACE**

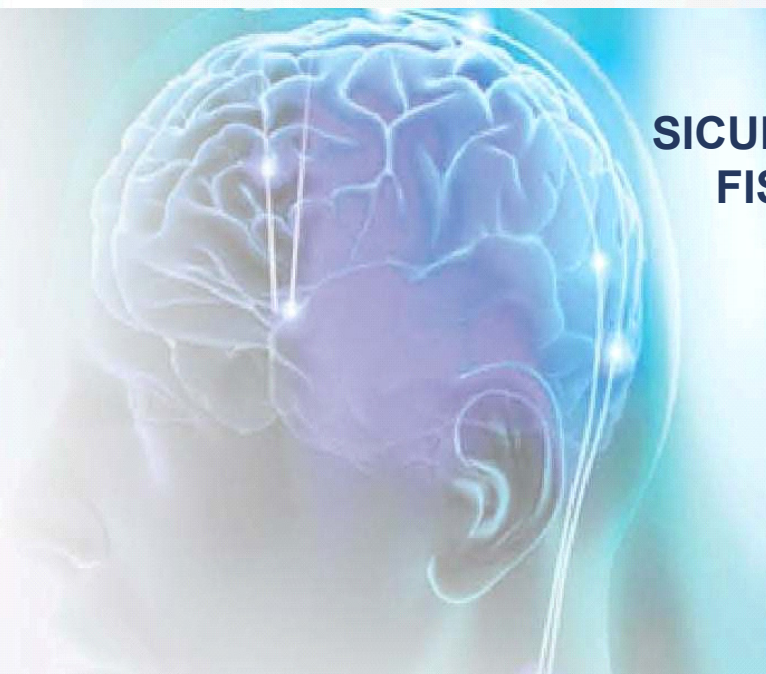

**Nota:** Durante la stimolazione, focalizzate la vostra mente su pensieri di tipo sessuale o su memorie intense del passato, o su esperienze sessuali reali avute nella vostra vita. Lasciate che sia il vostro pene che il vostro cervello stimolino i centri sessuali spinali. Rilassatevi. Evitate impazienza ed ansietà.

**ATTENZIONE:** Utilizzate queste istruzioni a vostro rischio. Non utilizzate mai la stimolazione con Viberecct e gli esercizi prestimolazione se avete lesioni sul pene. Il Viberecct utilizzato in uomini con lesioni spinali comporta rischio di disreflessia autonoma.

# ALEF

Via Novara, 139 – 20153 Milano  
Tel. 0245395260 Fax 0245395292  
E-mail [info@alef-online.net](mailto:info@alef-online.net)  
Web: [www.alef-online.net](http://www.alef-online.net)

**Reflexonic**